

# Sincodes Wipes

# TOKLA Clean

Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

Mit Frische Duft

## Sincodes Wipes

Inhalt 120 Blatt - UN 3175

**Anwendungsgebiete:** Gem. MPG: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Medizinprodukten. Gem. Biozidrichtlinie: Zur aldehydfreien Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen und alkoholbeständigem medizinischen Inventar.

Inhalt: 210 g Tränkflüssigkeit  
Sincodes

### Zusammensetzung:

100 g Tränkflüssigkeit enthalten:  
Ethanol 42 g;  
Didecyldimethylammoniumchlorid  
0,05 g.

**Hinweis:** Öffnen Sie die Nachfüllpackung. Formen Sie aus der geöffneten Packung eine Rolle. Lassen Sie den Inhalt inkl. Beutel direkt in die Spenderdose gleiten. Ziehen Sie aus der Rollenmitte das erste Tuch durch die Öffnung im Deckel der Spenderdose und setzen Sie den Deckel wieder auf die Dose. Bitte befüllen Sie die Dose nur mit einer Nachfüllpackung mit Sincodes Wipes Etikett !

**Sehr gut geeignet  
gegen das  
A/H1N1 Virus**

## Anwendung

**Wirkungsspektrum und Einwirkzeit für die Tränkflüssigkeit Sincodes Wipes:**

Inaktivierung von Bakterien inkl. MRSA, Pilze gem. DGHM/VAH: konz. 1 min.\*

Inaktivierung von Tuberkulose Bakterien: konz. 1 min.\*

Inaktivierung von behüllten Viren wie Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, (begrenzt viruzid): konz. 30 sec.

Inaktivierung von Rota-/ Adeno-Viren: konz. 1 min.

Inaktivierung von Noro (Norowalk- Like) Viren: konz. 15 min.

\* gelistet in der 5 min. Spalte nach DGHM/VAH.

Kennzeichnung gem. Gefahrstoffverordnung: Leichtentzündlich. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.



## Vorteile

- mit Frische Duft
- dermatologisch getestet
- umfassend wirksam